



# Codera con ajuste de neoprene

CODIGO DE PRODUCTO: C013

## FINALIDAD

Contener, estabilizar y proteger las inserciones musculotendinosas de la articulación de codo generando una compresión regulable sobre las estructuras anatómicas mencionadas.

## USOS GENERALES

Estabiliza y alivia tensiones. Brinda calor térmico, antiinflamatorio y analgésico. Recuperación de tendinitis, entesitis, tenosinovitis, traumatismos, esguinces, hiperlaxitud articular. Uso deportivo y actividades cotidianas.

## INDICACIONES

Inestabilidades articulares por hiperlaxitud, inflamación leve de las inserciones musculares de codo o distensiones ligamentarias. Tendinitis, tenosinovitis, entesopatías, epicondilitis (codo de tenista), epitrocleitis (codo de golfista). Si lo desea, consulte a su médico.

## CONTRAINDICACIONES

Alergia a alguno de los componentes de producto, lesiones de piel y partes blandas en la zona a tratar.

## GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



## PRECAUCIONES

Edema y dolor por ajuste excesivo o mal uso.

## CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



## CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.  
Contiene 1 unidad.



## CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



## ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS

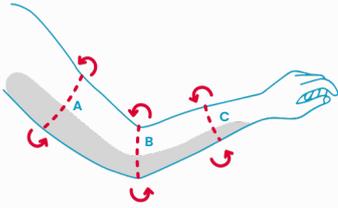

Para conocer tu talla, medí la circunferencia del bíceps, codo y antebrazo.

**UNISEX  
IZQUIERDO Y DERECHO**

TALLE	(A) BICEPS	(B) CODO	(C) ANTEBRAZO
1	22/26 cm	21/25 cm	20/24 cm
2	24/30 cm	22/26 cm	22/25 cm
3	26/34 cm	24/28 cm	24/28 cm
4	28/36 cm	26/30 cm	26/32 cm
5	32/38 cm	28/32 cm	28/34 cm

## INSTRUCCIONES DE USO



1. Introducir el brazo en la prenda.
2. Posicionar el orificio en el codo.
3. Cerrar el lazo en abrojo para una justa compresión.



**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**



latinoamericaortopedia@gmail.com



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

[www.mutualacila.org](http://www.mutualacila.org)

[ortopedialatino](https://www.instagram.com/ortopedialatino)

Estamos junto a vos,  
contanos tu experiencia:

11 3219-9666

**anmat**  
Asociación Nacional de Instrumentación  
Médica y Tecnología Médica

