



# Chaleco corrector postural en neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: C029

## FINALIDAD

Ayuda a posturar y corregir las desalineaciones del raquis dorsal, mejorar la postura de hombros y cintura escapular.

## USOS GENERALES

Cifosis dorsal e hiperlordosis lumbar, ante pulsión excesiva de hombros. Sostén y corrector postural. Alivia contracturas y tensiones musculares. Se recomienda la utilización por encima de una prenda de algodón en períodos fraccionados.

## INDICACIONES

Patologías que presenten cifosis dorsal (jorobas, dorsos curvos), antepulsión excesiva de hombros, u otras que generan malestar cervico dorsal e impiden una adecuada expansión torácica.

## CONTRAINDICACIONES

Cifosis dorsales irreductibles o no corregibles o que requieran tratamiento quirúrgico.

## GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

## PRECAUCIONES

Laceración de la región axilar por rozamiento excesivo o mal uso.

## CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



## CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 milímetros de espesor.  
Contiene 1 unidad.



## CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



## ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS

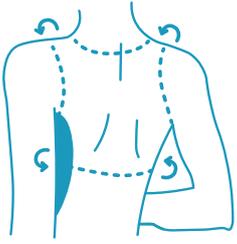

Para conocer tu talle, debes conocer tu talle de remera, peso y altura.

**UNISEX**


TALLE	TALLE DE REMERA	PESO	ALTURA
1	XS	50 kg	1.50 mts
2	M / L	80 kg	1.80 mts
3	XL / XXL	100 kg	2.00 mts

## INSTRUCCIONES DE USO



**1.** Pasar los brazos por los orificios.

**2.** Regular los abrojos laterales.

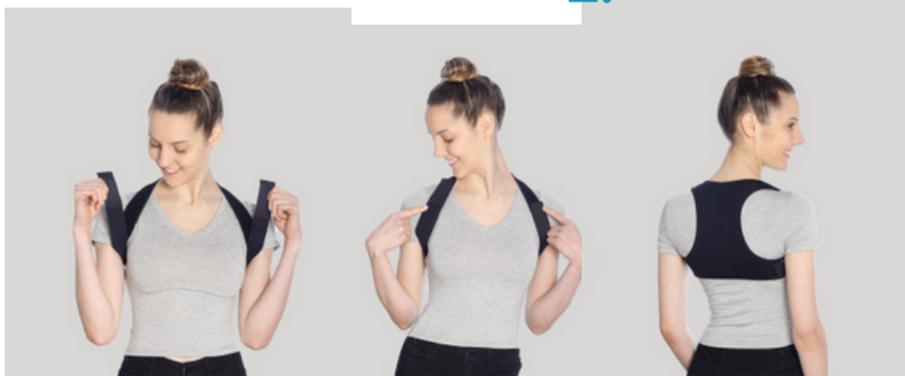

**3.** Centrar el chaleco en la espalda.



**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contanos tu experiencia:

11 3219-9666

latinoamericaortopedia@gmail.com

[www.mutualacila.org](http://www.mutualacila.org)

[ortopedialatino](https://www.instagram.com/ortopedialatino)

