



Collar schanz blando

CODIGO DE PRODUCTO:
COL004

FINALIDAD

Limitar la movilidad de la musculatura cervical de cabeza y cuello.

USOS GENERALES

Contracturas cervicales y esguinces leves.

INDICACIONES

Contracturas cervicales leves, esguinces, mareos y post operatorios. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Tratamientos que precisan movilidad cervical libre.

PRECAUCIONES

Reacciones dermatológicas por sudoración secundaria al uso de producto. Debilidad muscular de cabeza y cuello por uso excesivo.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CUIDADO



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Espuma de poliuretano con funda de algodón. Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

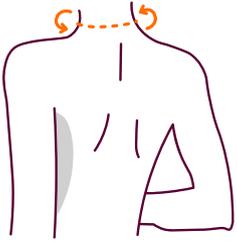

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de tu cuello.

UNISEX

TALLE	CIRCUNFERENCIA DE
P	CUELLO hasta 26 cm
CH	hasta 40 cm
M	hasta 42 cm
G	hasta 43 cm
EG	hasta 49 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Posicionar el producto en el cuello y cerrar con el abrojo en la nuca.

D.E.M.A. Respalda tus movimientos



latinoamericaortopedia@gmail.com



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.



www.mutualacila.org



[ortopedialatino](https://www.instagram.com/ortopedialatino)

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:



11 3219-9666

