



Muñequera boomerang con fleje de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: M009

FINALIDAD

Estabilizar y contener la articulación de la muñeca e inmovilizar parcialmente las articulaciones de pulgar.

USOS GENERALES

Distensiones ligamentarias o tendinosas, rizartrosis de pulgar, artritis, artrosis, sinovitis, recuperación de esguinces leves, túnel carpiano y torceduras. Brinda calor térmico, analgésico. Alivia dolores y tensiones musculares.

INDICACIONES

Patologías inflamatorias agudas o crónicas que comprometan la articulación de la muñeca y el pulgar, como distensiones ligamentarias, tendinosas, rizartrosis de pulgar, artritis, artrosis y sinovitis. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran movilizar la articulación del pulgar para su recuperación. Alergia a alguno de los componentes de producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

PRECAUCIONES

Hipotrofia muscular por uso prolongado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene de 4 mm de espesor.

Incluye una varilla inmovilizadora.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS



Para conocer tu talla, medí la circunferencia de la palma a la altura de los nudillos.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

Altura 9 cm

TALLE

PALMA

0	14 cm hasta 17 cm
1	17 cm hasta 21 cm
2	20 cm hasta 24 cm
3	23 cm hasta 27 cm
4	26 cm hasta 30 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Colocar el pulgar dentro del orificio de la prenda.



2. Sujetar el extremo más largo y dar la vuelta alrededor de la muñeca.



3. Cerrar con el abrojo.



4. Ajustar el último abrojo en el extremo del pulgar.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos



latinoamericaortopedia@gmail.com



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.



www.mutualacila.org



ortopedialatino

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:



11 3219-9666

