



BRAZO



Soporte postural de clavícula

CÓDIGO DE PRODUCTO: S027

FINALIDAD

Contener y estabilizar las clavículas, mejorar y corregir la postura en cifosis dorsal, alinear y aproximar las estructuras anatómicas de la cintura escapular.

USOS GENERALES

Sostén y corrector postural en actividades cotidianas. Alivia contracturas y tensiones musculares. Se recomienda la utilización por encima de una prenda de algodón en periodos fraccionados. Si lo desea, consulte a su médico.

INDICACIONES

Fracturas y fisuras claviculares, luxaciones y subluxaciones de las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular, deformidades posturales como la cifosis dorsal o la antepulsión excesiva de hombros.

CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



PRECAUCIONES

Malestares por uso excesivo. Irritación de la piel en la zona axilar por roce o uso inadecuado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Algodón 100% e interior acolchado.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

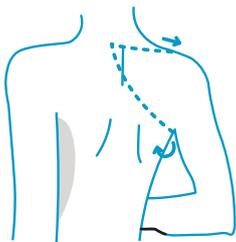


Para conocer tu talla, desde la postura erguida, medí la circunferencia partiendo desde el centro de la espalda (desde la cervical, 5 cm por debajo aprox), pasando por el hombro hacia adelante, luego pasar por debajo de la axila y volver al centro nuevamente.


UNISEX

TALLE	CLAVÍCULA	PESO
1	34/55 cm	hasta 40 kg
2	38/65 cm	hasta 70 kg
3	44/75 cm	hasta 80 kg
4	48/85 cm	hasta 90 kg



INSTRUCCIONES DE USO

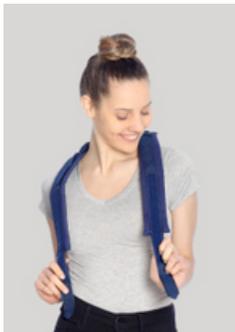


1. Posicionar la prenda debajo de la zona cervical.

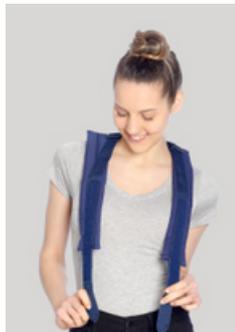



2. Tomar los tiradores desde el extremo superior y llevarlos al frente sobre los hombros.

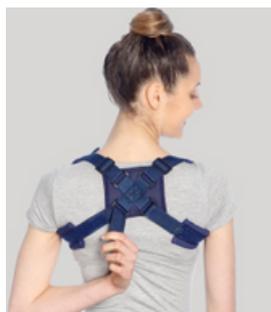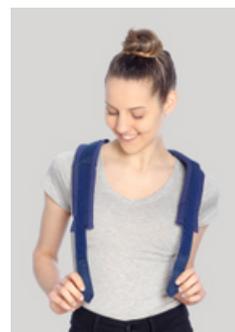

3. Pasar las tiras por debajo de las axilas.

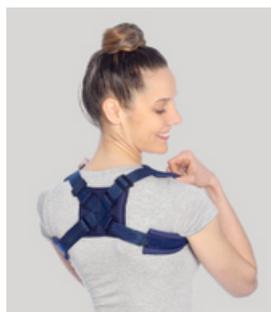

4. Deslizar cada una dentro de la argolla plástica correspondiente.

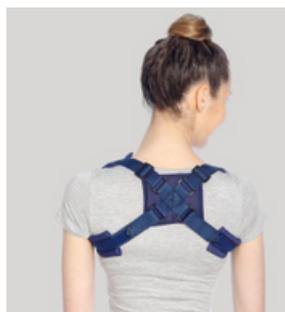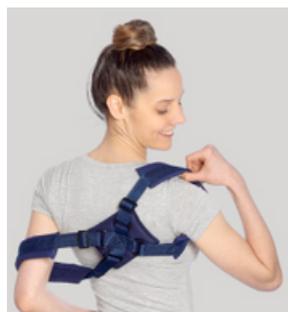

5. Ajustar y cerrar sobre el mismo tirador con el abrojo.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contamos tu experiencia:

11 3219-9666

latinoamericaortopedia@gmail.com

www.mutualacila.org

[ortopedialatino](https://www.instagram.com/ortopedialatino)

anmat
Asociación Nacional de Movimiento, Alimentación y Tecnología Médica

