



# Suspensor Anatómico

CODIGO DE PRODUCTO: SUS-A / SUS-AI CON SUPLEMENTO INTERNO INGUINAL



## FINALIDAD

Contener regiones anatómicas como la pared abdominal y la región inguinal, propensas a desarrollar protusiones viscerales en áreas de debilidad específica.

## USOS GENERALES

Ideal para contención de hernias inguinales, pre-operatorios, flacidez y sostén abdominal.

## INDICACIONES

Personas que requieran contener los órganos abdominales durante la actividad diaria, previniendo la aparición de hernias y/o eventraciones postoperatorias. Si lo desea, consulte a su médico.

## CONTRAINDICACIONES

Existencia previa de eventraciones y/o obstrucciones complicadas. Alergia a alguno de los componentes del producto.

## GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.

## PRECAUCIONES

Compresión excesiva o insuficiente por talla inadecuado.

## CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



## CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Algodón 66% - goma 34%.

El modelo SUS-AI incluye un suplemento inguinal interno manipulable según la necesidad de uso.

Contiene 1 unidad.



## CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



## ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

## MEDIDAS

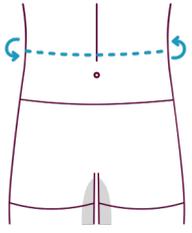

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de tu cintura.  
**UNISEX**

Modelo SUS-A

| TALLE | CINTURA   | TALLE | CINTURA   |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 1     | 44/60 cm  | 6     | 70/112 cm |
| 2     | 50/64 cm  | 7     | 80/120 cm |
| 3     | 54/74 cm  | 8     | 84/125 cm |
| 4     | 58/86 cm  | 9     | 90/130 cm |
| 5     | 66/100 cm |       |           |

## INSTRUCCIONES DE USO



1. Colocar como una prenda interior de uso cotidiano.
2. Ubicar la placa sobre la región a contener.



**D.E.M.A. Respalda tus movimientos**



latinoamericaortopedia@gmail.com



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.



www.mutualacila.org



ortopedialatino

Estamos junto a vos,  
contanos tu experiencia:



11 3219-9666

