



Inmovilizador de muñeca y pulgar de fibra

CÓDIGO DE PRODUCTO: I011

FINALIDAD

Inmovilizar las articulaciones de la muñeca y de pulgar limitando el movimiento de flexo-extensión articulares.

USOS GENERALES

Esguinces severos, tendinitis que afectan tendones flexores o extensores del carpo y dedos, tendinitis de quervain, post operatorios, dislocaciones, luxaciones.

INDICACIONES

Patologías que requieran limitación total de la movilidad de muñeca y pulgar con contención antebraquiopalmar. Esguinces severos, tendinitis que afectan tendones flexores o extensores del carpo y dedos, tendinitis de quervain de grado severo. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Procesos que requieran tratamiento quirúrgico. Alergia a alguno de los componentes de producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



PRECAUCIONES

Lesiones por ajuste excesivo. Hipotrofias musculares por uso prolongado.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 65% - Goma 35%.

Elástico nivel de compresión III.

Incluye 5 ballenas inmovilizadoras.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS

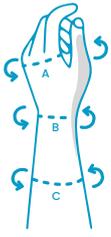

Para conocer tu talla, medí la circunferencia de la palma a la altura de los nudillos, muñeca y antebrazo.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

TALLE	(A) PALMA	(B) MUÑECA	(C) ANTEBRAZO
0	10/20 cm	14/18 cm	12/18 cm
1	14/20 cm	16/22cm	16/24 cm
2	16/24 cm	18/26 cm	18/28 cm
3	18/28 cm	20/30 cm	20/32 cm

INSTRUCCIONES DE USO




1. Abrir la prenda y posicionarla desde el pulgar hasta el antebrazo.

2. Cerrar los lazos en abrojo rodeando el antebrazo, muñeca y palma.



3. Ajustar la tira superior alrededor del dedo pulgar para inmovilizarlo.

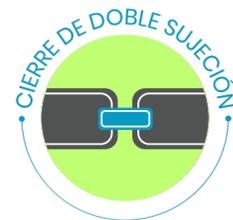

D.E.M.A. Respalda tus movimientos



Escanea el código QR si necesitas saber como usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contanos tu experiencia:

11 3219-9666

latinoamericaortopedia@gmail.com

www.mutualacila.org

[ortopedialatino](https://www.instagram.com/ortopedialatino)

