



Muñequera boomerang de neoprene

CÓDIGO DE PRODUCTO: M007

FINALIDAD

Estabilizar la articulación de la muñeca y del pulgar: carpometacarpiana, metacarpofalángica e interfalángica.

USOS GENERALES

Recomendada para aliviar artritis, tendinitis de quervain, distensión ligamentaria, artrosis, esguinces leves, túnel carpiano, torceduras y rizartrosis del pulgar. Uso deportivo y para actividades cotidianas.

INDICACIONES

Patologías que requieran limitación parcial de la movilidad de muñeca y pulgar. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Alergia a alguno de los componentes de producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



PRECAUCIONES

Debilidad e hipotrofia muscular por uso prolongado excesivo e inmóvil.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.

CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Neoprene 4 milímetros de espesor. Contiene 1 unidad.



seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS



Para conocer tu talle, medí la circunferencia de la palma a la altura de los nudillos.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

Altura 8 cm

TALLE	PALMA
0	14 cm hasta 17 cm
1	17 cm hasta 21 cm
2	20 cm hasta 24 cm
3	23 cm hasta 27 cm
4	26 cm hasta 30 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar el pulgar dentro del orificio de la prenda.



2. Sujetar el extremo más largo del producto y envolver alrededor de la muñeca.



3. Cerrar con el abrojo.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos



latinoamericaortopedia@gmail.com



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contanos tu experiencia:

11 3219-9666

www.mutualacila.org

[ortopedialatino](https://www.instagram.com/ortopedialatino)

